

Multi-3 Max Solución Humectante es una solución acuosa estéril libre de conservantes, formulada con ingredientes en cantidades adecuadas para brindar lubricación y confort por más horas al usuario de todo tipo de lentes de contacto.

**Composición:**

- Hialuronato de Sodio al 0,1%
- Buffer fosfato 0,935%
- Perborato de Sodio
- Dequest 0,0295
- Agua Purificada c.s.

**Instrucciones de Uso:**

Puede utilizar Multi 3 Max humectante cuantas veces sea necesario o según lo indicado por su médico, cuando el lente de contacto este en el ojo.

- Lavarse las manos antes de usar el producto.
- Aplicarse una o dos gotas en cada ojo y parpadee varias veces, evitando tocar el gotero del frasco con el ojo.
- Una gota antes de colocarse el lente para aumentar el confort.
- Una gota antes de retirar el lente para hidratarlo.