

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

### **MULTI-3<sup>MR</sup> MAX**

#### **Solución Multipropósito**

#### **DESCRIPCIÓN**

**Multi-3<sup>MR</sup> Max solución multipropósito** para todos los tipos de lentes de contacto blandos, es una solución acuosa estéril con un poder hidratante que prolonga el confort en el uso de los lentes de contacto blandos, este producto es de múltiple acción para el mantenimiento completo a sus lentes de contacto blandos. El sistema de acción hidratante HIDRAZYM<sup>MR</sup>, es una combinación de sorbitol y dexpanthenol (pro vitamina B5) que entre ellos ejercen una humectación adecuada y prolongada para el usuario de lentes de contacto blandos. Se complementa con otros insumos responsables de las acciones de desinfectar, limpiar, enjuagar, conservar y eliminar proteínas del lente de contacto blando, permitiendo un mejor confort dentro del mantenimiento completo que **Multi-3<sup>MR</sup> Max solución Multipropósito** le ofrece para sus lentes de contacto blandos.

#### **COMPOSICIÓN**

**Multi-3<sup>MR</sup> Max solución multipropósito** es una solución acuosa estéril, isotónica y bufferada que contiene sorbitol y dexpanthenol 2,08 %, cloruro de sodio, fosfato sódico y trometamina 1,062 %, edetato sódico y poloxámero 407 0,125 %, poliaminoaminopropil biguanida 0,1 mg % y agua purificada c.s.

#### **USO**

**Multi-3<sup>MR</sup> Max solución multipropósito** es utilizado para lavar, enjuagar, desinfectar, remover las proteínas, conservar, lubricar y humectar todo tipo de lentes de contacto blando, brindando al usuario un mantenimiento completo para sus lentes, con la mejora de brindar un efecto hidratante potenciado para un mayor confort durante el uso de sus lentes.

## INSTRUCCIONES DE USO

Este producto se puede utilizar de dos maneras:

Proceso lento (sin frotar ni enjuagar)

1. Con las manos bien lavadas, coloque el lente en su estuche y llénelo hasta cubrir el lente con **Multi-3<sup>MR</sup> Max solución multipropósito** para luego cerrar el estuche.
2. Deje el lente sumergido mínimo 4 horas.
3. Colocarse el lente previo enjuague con **Multi-3<sup>MR</sup> Max solución multipropósito**.

Proceso acelerado

1. Con las manos bien lavadas, frotar por 10 segundos cada superficie del lente con 3 – 4 gotas de **Multi-3<sup>MR</sup> Max solución multipropósito**.
2. Enjuague el lente con aplicación de solución fresca de **Multi-3<sup>MR</sup> Max solución multipropósito**, frotándolo entre los dedos por 10 segundos.
3. Coloque el lente dentro de su estuche y llénelo con **Multi-3<sup>MR</sup> Max solución multipropósito** hasta cubrir el lente, luego cierre el estuche.
4. Deje el lente sumergido mínimo 5 minutos.
5. Colocarse el lente previo enjuague con **Multi-3<sup>MR</sup> Max solución multipropósito**.

## PRECAUCIONES

- No tocar el gotero para evitar contaminar el producto.
- Mantener el frasco cerrado cuando no lo use.
- Consultar con su especialista para cualquier recomendación.
- Se recomienda cambiar el estuche de lentes cada 3 – 4 meses.

## CONTRAINDICACIONES

**Multi-3<sup>MR</sup> Max solución multipropósito**, está contraindicado en personas sensibles a cualquier componente del producto.

## **ADVERTENCIAS**

- No usar para casos de desinfección térmica.
- Eliminar la solución luego de 90 días de abierto el frasco.
- No reutilizar la solución multipropósito, para evitar un riesgo de contaminación.
- Si se presenta cualquier molestia o irritación, retirarse el lente y consultar con su especialista.
- Verificar que el sello de seguridad del envase esté intacto antes de su apertura.
- Mantener alejado de los niños.

## **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Almacenar a temperatura no mayor a 30°C.

## **CONTENIDO DEL ENVASE**

Caja por frasco gotero por 60 mL, 70 mL, 90 mL, 150 mL y 180 mL.

Caja por frasco gotero por 90 mL, 120 mL, 140 mL, 150 mL, 180 mL, 240 mL, 270 mL, 360mL y 400 mL con estuche gratis para lentes de contacto.

  
Laboratorios Roster S.A.  
Manuel Iribarren 1325 - Surquillo  
Telf.: 618-5555 - Lima - Perú