

Multi-3 Plus

Solución Multipropósito

DESCRIPCIÓN

Multi-3 Plus solución multipropósito, es una solución acuosa estéril mejorada, producto formulado para proporcionar un mantenimiento completo y adecuado a sus lentes de contacto blandos. En su formulación consideramos un sistema de múltiple acción AQUAZYM , compuesto por ingredientes en cantidades adecuadas encargados de realizar las acciones de mejor limpieza, remoción de proteínas y lubricar o humectar el lente de contacto blando como sistema diario de mantenimiento, además de sus acciones complementarias del producto de enjuagar , conservar y desinfectar. Se cuenta con citrato de sodio que conjuntamente con la cantidad apropiada de edetato, remueven los depósitos de proteínas al uso diario de esta solución. También se incluye la polividona para lubricar o humectar y la cantidad adecuada de polisorbato para mejor limpieza brindado un mayor confort al usuario.

COMPOSICIÓN

Multi-3 Plus solución multipropósito, es una solución acuosa estéril, isotónica y bufferada que contiene polisorbato y polividona 0,4%, con citrato y edetato de sodio 0,7%, poliaminopropil biguanida 0,1 mg% en sistema buffer 0,84% y agua purificada c.s.

USO

Multi-3 Plus solución multipropósito, para lentes de contacto blandos, es utilizado para lavar, enjuagar, desinfectar, lubricar, remover las proteínas y conservar todo tipo de lentes de contacto blando, brindando al usuario mayor confort y la ventaja de contar con una sola solución para el mantenimiento adecuado de sus lentes.

INSTRUCCIONES DE USO

LIMPIEZA Y ENJUAGUE - Con manos bien lavadas para efecto de limpieza, enjuagar cada superficie del lente por 10 segundos con Multi3 Plus solución multipropósito, arrastrando todos los residuos.

DESINFECCIÓN Y CONSERVACIÓN - Los lentes enjuagados son colocados en su estuche, el cual se llenará con solución fresca de Multi3 Plus solución multipropósito y se dejará durante 4 horas como mínimo para su desinfección química. Retirado el lente de su estuche, enjuagarlo con solución Multi-3 Plus solución multipropósito antes de colocárselo.

Los lentes se pueden conservar en su estuche debidamente cerrado y conteniendo solución Multi-3 Plus solución multipropósito.

REMOCIÓN DE PROTEÍNAS - Se realiza con el uso diario de Multi-3 Plus solución multipropósito al lavar y desinfectar sus lentes. Su especialista puede recomendarle procedimientos de mantenimiento más rigurosos, que es posible realizarlos con Multi-3 Plus solución multipropósito, adicionando como primer paso en las instrucciones: Colocar 3 - 4 gotas en cada superficie de lente

y frotar por 15 - 20 segundos entre los dedos y luego proceder al enjuague de ambos lados del lente con solución Multi-3 Plus solución multipropósito.

PRECAUCIONES

- Utilizar solución fresca de Multi-3 Plus solución multipropósito en cada paso de las instrucciones. - Mantener el frasco cerrado cuando no lo use.
- No tocar el gotero para evitar contaminar el producto.
- Conservar a temperatura ambiente.
- Se recomienda cambiar el estuche de lentes cada 3 - 4 meses.

CONTRAINDICACIONES

Multi-3 Plus solución multipropósito, está contraindicado en personas sensibles a cualquier componente del producto.

ADVERTENCIAS

- Seguir cuidadosamente las instrucciones y precauciones indicadas para un adecuado mantenimiento de sus lentes de contacto blandos.
- No usar para casos de desinfección térmica.
- Si se presenta cualquier molestia o irritación, retirarse el lente y consultar con su especialista.
- Verificar que el sello de seguridad del envase esté intacto antes de su apertura.
- Eliminar la solución luego de 90 días de abierto el frasco.
- Mantener alejado de los niños.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener almacenado a temperatura ambiente, no mayor a 30°C


Laboratorios Roster S.A.
Manuel Iribarren 1325 - Surquillo
Telf.: 618-5555 - Lima - Perú